

MANUAL TÉCNICO

DRENO DE SUÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO ORAL – ORAL CARE

1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Oral Care é um instrumento de higiene bucal descartável para pacientes com dificuldade de deglutição e expectoração, ou que não conseguem fazer cuidados orais de rotina. O dreno possui cerdas de escovação macias, de silicone grau médico, e é conectado a um aparato de sucção e a um dispositivo de irrigação para higienizar a boca e remover muco, restos de comida, placas, bem como bactérias, e para manter a cavidade oral limpa e reduzir o risco de infecção e pneumonia causada aspiração (PAV).

2 - INDICAÇÃO:

O Oral Care é usado para sugar o escarro enquanto que se faz a higiene oral dos pacientes, remover o muco e restos de alimentos, para manter a cavidade oral limpa, reduzindo o risco de infecção e pneumonia causada por aspiração (PAV).

3 – MODO DE USO:

- Abra a embalagem estéril e retire o Oral Care.
- Conecte-o a um dispositivo de sucção a vácuo.
- Regule a pressão do vácuo entre 40 a 50 kpa (300 a 375 mm hg), e controle a sucção colocando o dedo no orifício dorsal do Oral Care. Tente aspirar para certificar-se de que todas as vias de sucção do dreno estão funcionando normalmente.
- Inicie o procedimento sugando primeiro a secreção remanescente na cavidade oral do paciente com o Oral Care, e depois aplique a solução ou gel de higienização nas cerdas do Oral Care para realizar uma escovação a seco dos dentes, gengivas e outras partes da cavidade oral do paciente.
- Após a escovação a seco conecte um dispositivo com líquido enxaguante na porta de irrigação do Oral Care.
- Irrigue lentamente, escove e aspire a cavidade oral do paciente, até que a mesma esteja completamente limpa.

4 – DESCARTE:

O descarte e a disposição final do Oral Care devem obedecer as normas regulamentares vigentes, aplicáveis aos resíduos biológicos contaminados.

5 – INFORMAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- Produto esterilizado por Óxido de etileno.
- Produto estéril. Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.
- Leia todas as advertências e instruções antes de usar, o uso indevido pode resultar em lesões.
- Para utilização em um único paciente.
- Não utilizar após a data de validade.
- O produto se destina ao uso profissional.
- Ajustar a pressão de vácuo entre 40 a 50 kpa.
- A velocidade de irrigação para enxágue da cavidade oral do paciente deve ser sempre lenta. Se for muito rápida e volumosa poderá causar asfixia no paciente.
- Observar o estado do paciente durante a aspiração, a qualquer alteração significativa no paciente deve-se interromper imediatamente a operação.
- Armazenar Oral Care em local seco, temperatura ambiente e ao abrigo da luz.
- O uso do Oral Care não é recomendado em pacientes com queimadura na cavidade oral ou que apresentem quadros de convulsões contínuas.

Características:

- Tamanhos disponíveis: Adulto e Pediátrico
- Tamanho da haste do dreno: 200 mm de comprimento
- Orifício da haste do dreno: 7,5 +/- 0,5 mm
- Orifício do tubo de irrigação: 1,0 +/- 0,1 mm
- Orifício do conector do tubo de irrigação: 1,7 +/- 0,1 mm

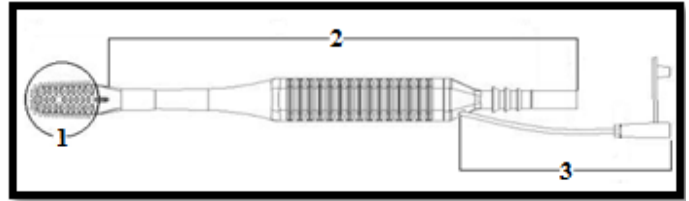


Foto ilustrativa: Oral Care - Cod. 14101000

- 1 - Cerdas de escovação
- 2 - Haste do dreno
- 3 - Tubo de irrigação com conector e tampa

Fabricado por:

Well Lead Medical Co., LTD.

Add: C-4 # Jinhu Industrial Estate, Hualong, Panyu, Guanzhou, 511434, P.R. China

Importador/Distribuidor exclusivo no Brasil:

Ross Medical Ltda

Rua: Coronel Vidal 1792/105 Mariano Procópio Juiz de Fora – MG

36080-080 – Tel: (32) 3225-1007 Fax: (32) 3223-6095

www.rossmedical.com.br

Registro na ANVISA: 80400329001

Responsável técnico: Carolina Mendonça de Almeida CRF/MG: 32044

Legenda da simbologia da rotulagem:



- Referência



- Data de Validade



- Data de Fabricação



- Manter Seco



- Temperatura de Armazenagem / Transporte

ROSS MEDICAL LTDA

CNPJ: 08.747.635/0001-69 – I.E: 001032540-0067

Rua Coronel Vidal, 1792, Galpão 4, 105, Mariano Procópio

Juiz de Fora / MG – CEP :36.080-080 - Tel/Fax.: (32) 3225-1007 / 3223-6095