

MANUAL TÉCNICO

POSICIONADOR DE PACIENTES VAC-PAC®

1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O VAC-PAC é um Posicionador de Pacientes, tipo colchão, fabricado em Polivinil macio e durável, livre de látex, disponível em diversos tamanhos e formatos, que tem um enchimento de milhares de esferas minúsculas de poliestireno. Quando ligado a uma fonte de vácuo é criado uma pressão negativa no seu interior, que faz com que a pressão atmosférica externa force a compressão das esferas moldando perfeitamente o VAC-PAC ao corpo do paciente.

Pelo fato de se moldarem perfeitamente ao corpo do paciente, o Posicionador de Pacientes VAC-PAC, além de fixar firmemente o paciente na posição ideal, permite uma distribuição uniforme do seu peso corporal, evitando riscos de queda e a ocorrência de úlceras por pressão, dando maior conforto e segurança aos pacientes e aos profissionais de saúde durante os procedimentos.

O Posicionador de Pacientes VAC-PAC é comercializado em sete tamanhos (11,23,30,31,32,35 e 40). O tamanho mais adequado para cada posicionamento depende do tipo de procedimento, da altura e do peso corporal do paciente.

2 - INDICAÇÃO:

O Posicionador de Pacientes VAC-PAC pode ser utilizado para imobilizar e/ou posicionar adequadamente o paciente em diversos tipos de procedimentos em centros cirúrgicos, leitos de UTI e salas de exames, etc, evitando o risco de queda do paciente e de aparecimento de úlceras por pressão.

3 – MODO DE USO:

A- Retire o Posicionador de Pacientes VAC-PAC da embalagem, e verifique se não há nenhum dano aparente no mesmo;

B- Abra o Posicionador de Pacientes VAC-PAC sobre uma superfície plana (mesa cirúrgica/cama) e, com a palma das mãos, espalhe as esferas. O centro do VAC-PAC deve ficar plano, com as esferas extras espalhadas pelas zonas laterais;

C- Mantenha a válvula do Posicionador de Pacientes VAC-PAC acessível.

D- Introduza uma extremidade do conector (5 em 1) na válvula do Posicionador de Pacientes VAC-PAC e, em seguida, ligue a extremidade oposta do conector (5 em 1) a uma fonte de vácuo;

E- Coloque um lençol limpo ou um campo cirúrgico sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC;

F- Posicione o paciente sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC de tamanho apropriado, ainda maleável e, em seguida, molde-o ao corpo e/ou membros do paciente, conforme descrito nos passos do item 4. Em seguida, siga os passos de G a K;

G- Molde o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável em torno do paciente e, segurando o Posicionador de Pacientes VAC-PAC com firmeza contra o paciente, mantenha-o na posição enquanto aplica o vácuo. O Posicionador de Pacientes VAC-PAC ficará rígido em alguns segundos;

H- Verifique a estabilidade do paciente. Utilize apoios lombares e almofadas de gel se necessário, evitando a existência de pontos de pressão;

I- Quando o Posicionador de Pacientes VAC-PAC estiver totalmente rígido, com o paciente na posição adequada, desligue a fonte de vácuo, retire o conector (5 em 1) e feche a tampa da válvula do VAC-PAC;

J- Confirme se o Posicionador de Pacientes VAC-PAC se mantém rígido, com o paciente na posição adequada durante todo o procedimento. Se necessário, mantenha a fonte de vácuo ligada;

K- Ao final do procedimento, destape e aperte as laterais da válvula para retirar o vácuo e amolecer o Posicionador de Pacientes VAC-PAC, liberando o paciente da posição.

4 – TAMANHOS E POSIÇÕES MAIS COMUNS

Posição decúbito lateral: Tamanhos 30, 31 ou 32

Ideal para Cirurgia geral, Ortopedia, Cirurgia plástica, e Cirurgia torácica.

1- Coloque o “U” voltado na direção da cabeça ou dos pés. Se o “U” estiver voltado na direção da cabeça, deve ficar colocado por baixo da axila dependente;

2- Dobre os cantos do Posicionador de Pacientes VAC-PAC para dentro, se necessário.

Posição lombar lateral: Tamanhos 30, 35

Ideal para: Nefrologia, Ortopedia, Cirurgia plástica, Cirurgia torácica.

1-Tamanho 35: Coloque a extremidade estreita do Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável voltada na direção dos pés e as abas em forma de T posicionadas para envolvimento da zona peitoral;

Tamanho 30: Coloque o “U” voltado na direção da cabeça do paciente colocado por baixo da axila dependente;

2-Ajuste a mesa articulada.

Posição decúbito dorsal: Tamanho 40

Ideal para: Anestesia parcial, Cirurgia geral, Cirurgia plástica.

1-Coloque o paciente em decúbito dorsal sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável;

2-Posicione os braços do paciente ao longo do corpo, deixando livres os acessos para medicação intravenosa, se necessário.

Posição ginecológica: Tamanhos 30, 31 ou 35

Ideal para: Urologia, Ginecologia, Cirurgia plástica.

1-Tamanho 35: Coloque o paciente em decúbito dorsal sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável, com as ancas centradas na extremidade estreita e as abas em forma de T na direção dos pés;

Tamanho 30, 31: Coloque o “U” sob as nádegas do paciente;

2-Coloque o paciente na posição ginecológica e, em seguida, molde o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável em torno dos pés, tornozelos e ancas.

Posição de flexão do joelho: Tamanhos 30, 35

Ideal para: Ortopedia

1-Coloque o paciente em decúbito dorsal e acondicione o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável sob a perna a ser operada;

2-Molde o Posicionador de Pacientes VAC-PAC em torno do pé, tornozelo, perna e anca do paciente.

Posição torácica: Tamanhos 30, 31, 32 ou 35

Ideal para: Cirurgia torácica.

1-Tamanho 35: Coloque a extremidade estreita voltada na direção da cabeça e as abas em forma de T posicionadas para o envolvimento das ancas;

Tamanhos 30, 31 e 31: Coloque o “U” voltado na direção da cabeça do paciente, posicionado por baixo da axila dependente;

2-Coloque o paciente em decúbito lateral sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável;

3-Molde o Posicionador de Pacientes VAC-PAC em torno das ancas do paciente.

Posição cervical: Tamanho 23

Ideal para: Anestesiologia, Otorrinolaringologia.

1-Coloque o paciente em decúbito dorsal sobre o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável, com a extremidade larga sob os ombros/dorso superior do paciente e a extremidade estreita alinhada com a parte superior da cabeça.

2-Enquanto um enfermeiro apoia a cabeça e o pescoço do paciente, um segundo enfermeiro puxa com cuidado o terço superior do Posicionador de Pacientes VAC-PAC, elevando-o para a posição cervical de forma a criar um apoio em “V” por baixo da cabeça e do pescoço do paciente.

Posição facial/oftalmológica: Tamanho 11

Ideal para: Oftalmologia, Cirurgia plástica facial, Otorrinolaringologia, Cirurgia Dentária/Estomatologia;

1-Coloque o paciente em decúbito dorsal e molde o Posicionador de Pacientes VAC-PAC maleável em torno da cabeça do paciente.

4 – INFORMAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

Posicionamento e estabilidade do paciente:

-Escolha um Posicionador de Pacientes VAC-PAC adequado à intervenção e ao tamanho e peso do paciente. A utilização de um modelo incorreto reduz a estabilidade do paciente.

-Confirme se o paciente está corretamente posicionado no VAC-PAC antes de cobri-lo com o lençol cirúrgico. Durante a intervenção, verifique com frequência a posição do paciente e a estabilidade do Posicionador de Pacientes VAC-PAC.

-Uniformize as esferas do VAC-PAC, espalhando a zona sobre a qual o paciente será colocado e faça deslizar o excesso de esferas para as extremidades para serem de novo moldadas contra o paciente. Zonas laterais mais espessas proporcionam maior solidez e apoio ao paciente, enquanto que o achatamento da parte inferior evita que o Posicionador de Pacientes VAC-PAC se enrole quando for aplicado o vácuo.

- Quando colocar o paciente na posição Trendelenburg ou Trendelenburg inversa, não utilize o VAC-PAC como o único meio de apoio do paciente. Utilize os apoios de ombro ou outros dispositivos anexados à mesa em conjunto com o Posicionador de Pacientes VAC-PAC;

-Se o local cirúrgico exigir uma maior exposição junto de um canto do Posicionador de Pacientes VAC-PAC, empurre as esferas para a parte exterior do canto e dobre o VAC-PAC, antes de aplicar o vácuo;

-Quando o Posicionador de Pacientes VAC-PAC é moldado ao redor de um paciente, a superfície irá apresentar rugosidades invertidas. Estas rugosidades invertidas não irritarão a pele do paciente;

-Verifique o correto posicionamento e a estabilidade do paciente. Se necessário, utilize rolos de proteção adicionais para melhor fixar o VAC-PAC, apoios lombares e/ou cintos de segurança;

- Verifique a posição do paciente durante a intervenção. Se for necessário reposicionar o paciente, aperte a válvula para amolecer o Posicionador de Pacientes VAC-PAC e repita o processo de posicionamento;
- Verifique a estabilidade do Posicionador de Pacientes VAC-PAC durante a intervenção. Se este amolecer durante a cirurgia, ligue de novo o tubo de sucção e mantenha a fonte de vácuo ligada durante o procedimento.

Cuidados na Utilização:

- Os Posicionadores de Pacientes VAC-PACs são transparentes à radiação e podem, portanto, ser utilizados em procedimentos de radiologia. Algumas rugosidades do Posicionador de Pacientes VAC-PAC podem aparecer e ser facilmente identificáveis nos exames de raio X;
- Outro tipo de conector pode danificar a válvula do Posicionador de Pacientes VAC-PAC. Utilize apenas o conector (5 em 1) fornecido pelo fabricante;
- Antes de utilizar, limpar ou reparar este produto leia e familiarize-se com o manual de instruções;
- Este produto deve ser utilizado sob a supervisão de um médico;
- Este produto deve ser utilizado como auxiliar de posicionamento, e não como único sistema de imobilização;
- Evite danificar o Posicionador de Pacientes VAC-PAC com agulhas, bisturis ou outros instrumentos perfurocortantes;
- Não utilize o Posicionador de Pacientes VAC-PAC na presença de gases inflamáveis;
- Feche a tampa da válvula depois de aplicar sucção para evitar fugas de ar e manter a forma moldada durante o procedimento cirúrgico;
- Nunca segure no Posicionador de Pacientes VAC-PAC pela válvula para levantá-lo ou sacudi-lo, pois se o fizer, poderá danificá-la.

Irritação cutânea:

- Faça a preparação do paciente antes de posicioná-lo no Posicionador de Pacientes VAC-PAC. A existência de umidade entre o paciente e o Posicionador de Pacientes VAC-PAC pode provocar irritação cutânea, e as soluções à base de iodo podem manchar o Posicionador de Pacientes VAC-PAC;
- Uma vez concluída a preparação do paciente, retire as compressas e lençóis úmidos, e seque as partes úmidas do paciente, inclusive as que estiverem com as soluções de preparação, antes de envolver o paciente com o Posicionador VAC-PAC;
- Utilize o Posicionador de Pacientes VAC-PAC apenas sobre pele não lesionada;
- Alise quaisquer rugosidades existentes em proteções ou almofadas de gel utilizadas com o Posicionador de Pacientes VAC-PAC, uma vez que as superfícies rugosas podem provocar irritação cutânea;

Limpeza e armazenamento:

- Este produto é fornecido não esterilizado. Limpe-o e desinfete-o sempre antes da primeira utilização, utilizando sabão neutro, soluções à base de biguanida, quaternário de amônia, ou gás à base de Óxido de Etileno;
- Após a esterilização a gás, areje o Posicionador de Pacientes VAC-PAC de forma idêntica aos produtos plásticos;
- Não utilize hidrocarbonetos aromáticos (ex., acetona), ou álcool para limpeza e desinfecção, uma vez que estes agentes podem danificar o Posicionador de Pacientes VAC-PAC;
- Limpe o Posicionador de Pacientes VAC-PAC entre cada utilização para evitar contaminação cruzada nos pacientes;
- A exposição a temperaturas elevadas danifica o Posicionador de Pacientes VAC-PAC. Portanto, nunca o esterilize em autoclave;
- Feche sempre a tampa da válvula antes de limpá-lo, para impedir a entrada de líquidos no Posicionador de Pacientes VAC-PAC;

Inspecção, danos e fugas:

- Antes e após cada utilização, inspecione o Posicionador de Pacientes VAC-PAC para verificar a existência de possíveis danos ou fugas. Nunca o utilize danificado ou com fugas de vácuo;
- Não tente reparar o Posicionador de Pacientes VAC-PAC com fita-adesiva. Utilize apenas remendos fornecidos pela Olympic;
- Para evitar a ocorrência de lesões no paciente, nunca tente reparar ou utilizar Posicionador de Pacientes VAC-PAC nas seguintes condições: válvula com fuga ou buracos/rasgos com mais de uma pol. (2,54 cm), localizados a duas pol. (5 cm) da válvula, ao redor das extremidades da válvula, ou em uma linha de junção;
- Para garantir que o Posicionador de Pacientes VAC-PAC se encontra nas melhores condições e para minimizar potenciais problemas, substitua-os: imediatamente (quando apresentarem danos não passíveis de reparação), com cinco anos (se utilizados várias vezes por semana), com três anos (se utilizados várias vezes por dia, e que tenham sido remendados mais do que uma vez).

Características:

Conector 5 em 1: - Altura: 2,75pol. (6,99cm); Diâmetro interno: 0,5pol. (1,27cm); Diâmetro externo: 0.625pol. (1,59cm); Validade: Indeterminada.

POSICIONADOR DE PACIENTES VAC-PAC				
TAM	Nº DO CATÁLOGO	DIMENSÕES		FORMATO
		POL.	CM	
11	51611	16 X 12	40,6 X 30,5	Pequeno U
23	51623	18 X 20	45,7 X 50,8	Pequeno U no lado com 18pol., Pequeno
30	51630	28,7 X 35,5	72,9 X 90,2	Pequeno U num lado com 28,7pol., Médio
31	51631	38,7 X 35,5	98,3 X 90,2	Pequeno U num lado com 38,7pol., Grande
32	51632	46,7 X 35,5	118,6 X 90,2	Pequeno U num lado com 46,7pol., Extra grande
35	51635	34,5 X 28	87,6 X 71,1	Abas / em forma de T
40	51640	30 X 76	76,2 X 193,1	Retângulo grande

*Medidas (largura X comprimento) de um Posicionador de Pacientes VAC-PAC. A profundidade depende do posicionamento e da compressão das contas.

Fabricado por:

Natus Medical Incorporated
5900 First Ave. South Seattle, WA 98108 USA

Importador/Distribuidor exclusivo no Brasil:

Ross Medical Ltda
Rua: Coronel Vidal 1792/105 Mariano Procópio Juiz de Fora – MG
36080-080 – Tel: (32) 3225-1007 Fax: (32) 3223-6095
www.rossmedical.com.br

Registro na ANVISA: 80400320005

Responsável técnico: Carolina Mendonça de Almeida CRF/MG: 32044

Legenda da simbologia da rotulagem:



- Referência



- Data de Validade



- Data de Fabricação



- Manter Seco



- Temperatura de Armazenagem /Transporte

ROSS MEDICAL LTDA

CNPJ: 08.747.635/0001-69 – I.E: 001032540-0067
Rua Coronel Vidal, 1792, Galpão 4, 105, Mariano Procópio
Juiz de Fora / MG – CEP :36.080-080 - Tel/Fax.: (32) 3225-1007 / 3223-6095