

## MANUAL TÉCNICO

### **BOLSA COLETORA PARA DISPOSITIVO DE DRENAGEM POR SUÇÃO QIN POT® COOPDECH**

#### **1 – DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Bolsa coletora descartável, com capacidade de 1 litro, dobrável, com lacre, confeccionada em polietileno, contendo válvula diafragma unidirecional antirrefluxo e válvula hidrofóbica antitransbordamento, para armazenagem e descarte de fluidos corpóreos em “sistema fechado” (sem a possibilidade de escoamento do resíduo), conforme item 5.4.1 da RDC 306 da ANVISA e CONAMA 358, compatível com Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech.

#### **2 - INDICAÇÃO:**

A bolsa coletora para dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech é uma unidade de drenagem de fluidos por sucção à vácuo, para uso em diversas unidades hospitalares. O objetivo é a aspiração e armazenagem de fluidos teciduais, saliva e sangue, em uma bolsa coletora descartável, sistema fechado, que permita o manuseio e transporte seguro para o tratamento e descarte do resíduo infectante, em atendimento à RDC 306 e CONAMA 358.

#### **3 – MODO DE USO:**

- Coloque a Bolsa coletora, fechada e lacrada, dentro do canister do Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech, posicionando o lado do bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora para o lado em que se encontra o paciente;
- Verifique se a tampinha de vedação lateral do canister (posicionada do lado oposto do bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora) está corretamente instalada;
- Feche a tampa do dispositivo;
- Puxe levemente o botão de controle de pressão do dispositivo (posicionado na parte inferior do equipamento), para liberar o movimento giratório para regulagem da pressão do vácuo;
- Ajuste a pressão do vácuo, de acordo com a pressão mais adequada para o procedimento/paciente;
- Empurre o botão de controle de pressão do dispositivo para frente até ouvir um CLIC, travando-o na pressão desejada;
- Certifique-se de que o bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora esteja tampado com a tampa protetora;
- Gire a chave ao lado do botão de regulagem de vácuo do dispositivo em 90° para a esquerda, colocando-o na posição (ON) e prossiga com o procedimento de aspiração do paciente;
- Retire a tampa protetora do bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora (para que ela se expanda dentro do canister) e encaixe nele o tubo de sucção do paciente;
- Prossiga com a aspiração do paciente, dentro das normas e protocolos da instituição;
- Finalizado o procedimento de aspiração do paciente, interrompa a sucção girando a chave ao lado do botão de regulagem de vácuo do dispositivo em 90° para a direita até a posição (OFF);
- Caso a bolsa coletora esteja cheia, ou o paciente não precise mais de aspiração, ou já tenha decorrido seis dias de uso da bolsa coletora no mesmo paciente, remova o tubo para sucção do paciente do bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora descartando-o em saco infectante;
- Conecte a tampa protetora ao bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora, para realizar o manuseio de descarte seguro;
- Coloque uma das mãos sob a tampa do dispositivo e pressione a trava da tampa (botão cinza - OPEN) com o polegar para abri-la;
- o) Desencaixe a bolsa coletora infectada do dispositivo para o descarte, enquanto segura o canister com uma das mãos, erga e remova a bolsa coletora com a outra, puxando-a com o dedo indicador pelo orifício de sustentação que se encontra na sua parte superior.

#### **4 – INFORMAÇÕES, PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

- Inspeção a integridade da bolsa coletora antes de usá-la. Não utilize-a se a mesma apresentar algum dano;
- A pressão de vácuo máxima do Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech será definida pela pressão máxima da fonte geradora de vácuo utilizada no estabelecimento (rede de vácuo ou bomba portátil);
- Ao ajustar a pressão de vácuo do Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech, puxe o botão de controle de pressão para liberar o movimento giratório;

- Caso perceba algo anormal durante o uso, pare de usar imediatamente o Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech, a bolsa coletora e contate o distribuidor local;
- Não remova o lacre da bolsa coletora antes de colocá-la no canister. A própria pressão do vácuo romperá o lacre e promoverá a expansão da bolsa coletora dentro do canister quando a tampa do bico de encaixe do tubo de sucção da bolsa coletora for retirada, com o dispositivo ligado (botão em - ON);
- Se a aspiração for interrompida pelo bloqueio da válvula hidrofóbica antitransbordamento da bolsa coletora, não deixe a unidade nessas condições. Prontamente descarte a bolsa coletora e a substitua-a por outra nova;
- Sempre utilizar equipamentos de proteção (luvas de borracha, máscara, óculos, etc.) ao realizar os procedimentos de aspiração do paciente;
- Jamais desmonte o dispositivo a não ser para fins de limpeza;
- A bolsa coletora é descartável e de uso único, portanto não deve ser utilizada em mais de um paciente, nem no mesmo paciente por um período superior ao recomendado pelo fabricante (seis dias);
- Utilize tubo conector de aspiração do paciente com diâmetro externo entre  $\Phi$  6,5 mm a  $\Phi$  8,5 mm;
- Em caso de acidente durante a aspiração, com extravasamento de resíduo infectante aspirado para fora da bolsa coletora, contaminando o canister, não abra o dispositivo, nem exponha a bolsa coletora. Interrompa o procedimento, retire o dispositivo do leito do paciente e contate imediatamente um representante local para proceder com a avaliação do ocorrido e o posterior descarte da bolsa coletora dentro das normas regulatórias pertinentes (RDC306/2004);
- Não utilize a bolsa coletora se não tiver recebido o treinamento adequado para manuseio do Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech;
- As técnicas médicas e os procedimentos descritos nesta instrução não representam todos os protocolos aceitáveis nem têm a intenção de substituir a experiência médica no tratamento de um paciente específico;
- O Armazenamento e transporte da bolsa coletora deve ser sempre em local seco e protegido da luz, a uma temperatura entre - 05° e 40°, e umidade entre 10% e 80%.

#### **5 - DESCARTE DA BOLSA COLETORA:**

Descarte a Bolsa coletora para Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech de acordo com o protocolo da Instituição de Saúde e em atendimento às normas regulatórias pertinentes (RDC306/2004 e CONAMA 358).

#### **Características:**

- Capacidade de armazenamento de fluidos: 1000mL
- Diâmetro recomendado do tubo de sucção do paciente: diâmetro interno não inferior a 6 mm; comprimento inferior a 3m.
- Espessura da bolsa coletora: 0,1 a 0,5 mm
- Largura da bolsa coletora: 190 mm
- Comprimento da bolsa coletora: 290 mm
- Códigos: CQD10-H-EU / CQD10-H - Bolsa coletora para Dispositivo de drenagem por sucção Qin Pot® Coopdech.
- Validade: 5 anos.

#### **Fabricado por:**

Daiken Medical Co. Ltd  
2-6-2 Ayumino, Izumi-shi, Osaka, 594-1157, Japão.



#### **Importador/Distribuidor exclusivo no Brasil:**

Ross Medical Ltda  
Rua: Coronel Vidal 1792/105 Mariano Procópio Juiz de Fora – MG  
36080-080 – Tel: (32) 3225-1007 Fax: (32) 3223-6095  
[www.rossmedical.com.br](http://www.rossmedical.com.br)

**Registro na ANVISA:** 80400329002

**Responsável técnico:** Carolina Mendonça de Almeida CRF/MG: 32044

#### **Legenda da simbologia da rotulagem:**

- Ref** – Referência      **Val** – Validade      **Fab** – Fabricação
-  - Escuro e Seco       - Temperatura de Armazenagem / Transporte

#### **ROSS MEDICAL LTDA**

CNPJ: 08.747.635/0001-69 – I.E: 001032540-0067  
Rua Coronel Vidal, 1792, Galpão 4, 105, Mariano Procópio  
Juiz de Fora / MG – CEP :36.080-080 - Tel/Fax.: (32) 3225-1007 / 3223-6095